

COVID-19 antigeeni kiirtest

KASUTUSJUHEND

Test on mõeldud professionaalseks kasutamiseks meditsiinitöötaja või selleks väljaõppe saanud isiku poolt.

TESTKOMPLEKT

Testkomplekti kuulub:

- testkassett
- ühekordselt kasutatav vatitampoon
- puhverlahuse katsuti (anum)

- COVID-19 (SARS-CoV-2 viiruse) antigeeni kiirtesti karp sisaldab 25 testkomplekti.
- Karbis on lisaks kaks kontrolltampooni: negatiivne ja positiivne, millega vajadusel kontrollitakse testkasseti toimivust.

ENNE TESTIMIST:

- enne kasutamist hoia testkomplekti toatemperatuuril 15-30° C;
- veendu, et testkomplekti pakend on terve;
- kontrolli testi aegumiskuupäeva;
- loe eelnevalt pakendi infolehte;
- pese ja desinfitseeri käed;
- kasuta isikukaitsevahendeid;
- testi kuni 1 tunni jooksul pärast testproovi võtmist;
- nuuska nina!


PÄRAST TESTIMIST:

- käitle isikukaitsevahendeid ja jäätmeid kui olmeprügi;
- pese käed!

KASUTUSJUHEND:


- Enne testimist võta lähedusse prügikast jäätmete jaoks. Ava testkasseti pakend, aseta tasasele ja puhtale pinnale.
- Kui testitakse mitut isikut korraga, märgistada iga puhverlahuse katsuti ja testkassett vastava isiku initsiaalidega ning fikseerida proovivõtmise kellaaeg.

1

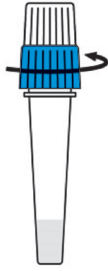


Keera lahti katsuti sinine kork katsutit pigistamata. Hoiä katsutit püstises asendis, et puhverlahus välja ei valguks. Võta vatitampoon pakendist välja.

2

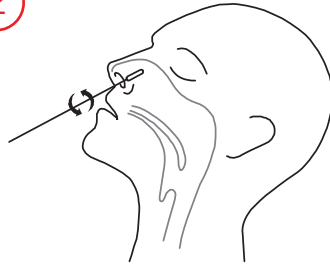

Sisesta vatitampoon ettevaatlikult 1 - 2,5 cm sügavusele ninasõõrme esiosasse. Piisava koguse proovi tagamiseks keeruta tampooni 5 korda vastu ninasõõrme limaskestata. Korda sama teises ninasõõrmes. Eemalda tampoon ninaõõnsusest.


3

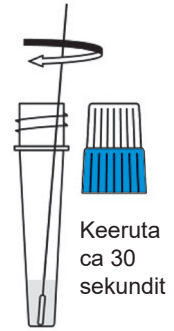

Keeruta ca 30 sekundit

Sisesta vatitampoon katsutisse ja keeruta seda puhverlahuses vähemalt 30 sekundit.


4

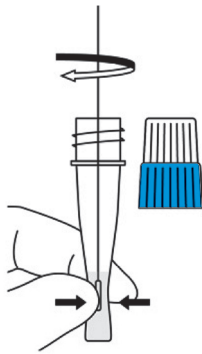

Pööra vähemalt 5 korda samal ajal pigista katsutit

Keeruta vatitampooni katsutis 5 korda katsuti külgi kokku surudes. Väldi vedeliku välja pritsimist. Vatitampoonilt testproovi kätte saamiseks suru katsuti külgi kokku, et proovimaterjal puhverlahusesse valguks.

5

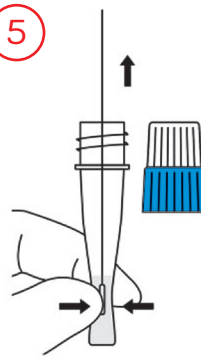


Võta vatitampoon katsutist välja.

6



Sulge katsuti sinine kork. Puhverlahuse segunemiseks loksuta katsutit õrnalt.

7

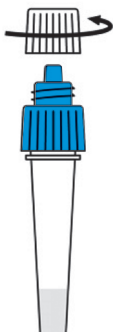

Ava katsuti läbipaistev kork, pööra katsuti ümber, hoiä püstises asendis nii, et tilguti oleks suunatud allapoole.

8



Suru katsuti küljed õrnalt kokku ning tilguta 4 tilka lahust testkasseti süvendisse.

9

15-30 min




Oota kuni ilmu(b)vad värvili(ne)sed joon(ed). Testi tulemusi loe 15-30 minuti jooksul. Testi tulemused on kehtetud pärast 30 minuti möödumist.


TESTI TULEMUSTE TÕLGENDAMINE



NEGATIIVNE: kontrollalale (C) ilmub üks värviline joon. Testjoone alas (T) ei ole nähtavat värvilist joont. SARS-CoV-2 antigeeni ei tuvastatud. Jätka toimetusi!

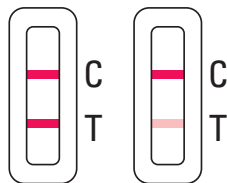

POSITIIVNE: nähtavad on kaks värvilist joont. Üks joon kontrollalal (C) ja teine joon testjoone alas (T). See tähendab, et tuvastati SARS-CoV-2 antigeen. Testjoone (T) värvi tugevus võib olla erinev. Positiivseks tuleb lugeda mis tahes värvivarjund testjoone alas (T). **Võta ühendust perearstiga või Terviseametiga.**

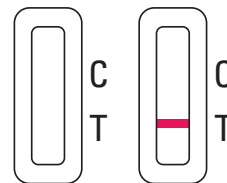

KEHTETU: kontrolljoont ei ilmu. Kontrolljoone mitteilmumise kõige tõenäolisemad põhjused on proovi ebapiisav kogus või tegutsemine. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja korrake testi uue testkomplektiga.